



Кресла-туалеты

10580, 10581Ca, 10583,
10589, 10582



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	6
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	6
2.1 Важные предупреждения.....	6
2.2 Порядок работы.....	6
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	9

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик кресел-туалетов моделей: 10580; 10581Са; 10583; 10589, 10582.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Кресла-туалеты (кресло-стулья) с санитарным оснащением являются медицинским изделием, предназначенным для ухода за людьми с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата.

1.2 Технические характеристики

Для получения для подробных характеристик стоит обратиться к сайту: www.sims2.ru

Модель 10580.

- Кресло-туалет 3 в 1 (может применяться как кресло-туалет, насадка на унитаз или поручень для унитаза)
- Складная конструкция
- Рама изготовлена из стали с порошковым напылением
- Поручни с пластиковыми подлокотниками
- Сиденье, ведро и крышка изготовлены из гигиенического пластика
- Съёмное ведро с крышкой
- Съёмная, гигиеническая защита от брызг, если кресло-туалет используется как насадка на унитаз
- Регулируемая высота сиденья
- Регулируемые по высоте ножки с противоскользящими резиновыми наконечниками
- Съёмная спинка
- Максимальная нагрузка: 115 кг.
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10581Са.

- Кресло-туалет 2 в 1 (может применяться как кресло-туалет или поручень для унитаза)
- Кресло-туалет оснащен 4-я колесами с 2-я тормозами
- Складная конструкция
- Рама изготовлена из хромированной стали
- Поручни с пластиковыми подлокотниками
- Сиденье, ведро и крышка изготовлены из гигиенического пластика
- Съёмное ведро с крышкой
- Регулируемая высота сиденья
- Регулируемые по высоте ножки с противоскользящими резиновыми наконечниками
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10583.

- Кресло-туалет 3 в 1 (может применяться как кресло-туалет, насадка на унитаз или поручень для унитаза)
- Рама изготовлена из стали с порошковым напылением
- Откидные вниз поручни с мягкими подлокотниками
- Сиденье, ведро и крышка изготовлены из гигиенического пластика
- Съёмное ведро с крышкой
- Съёмная гигиеническая защита от брызг , если кресло-туалет используется как насадка на унитаз
- Регулируемая высота сиденья
- Регулируемые по высоте ножки с противоскользящими резиновыми наконечниками
- Съёмная спинка
- Максимальная нагрузка: 115 кг.
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10589.

- Кресло-туалет 3 в 1 повышенной грузоподъемности (может применяться как кресло-туалет, насадка на унитаз или поручень для унитаза)
- Увеличенное расстояние между поручнями
- Рама изготовлена из анодированного алюминия
- Разборная конструкция рамы
- Сиденье, ведро и крышка изготовлены из гигиенического пластика
- Съёмное ведро с крышкой
- Съёмная гигиеническая защита от брызг , если кресло-туалет используется как насадка на унитаз
- Регулируемая высота сиденья
- Регулируемые по высоте ножки с противоскользящими резиновыми наконечниками
- Поручни с мягкими подлокотниками
- Максимальная нагрузка: 180 кг.
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10582.

- Кресло-туалет 3 в 1 повышенной грузоподъемности (может применяться как кресло-туалет, насадка на унитаз или поручень для унитаза)
- Увеличенное расстояние между поручнями
- Разборная конструкция рамы
- Сиденье, ведро и крышка изготовлены из гигиенического пластика
- Съёмное ведро с крышкой
- Съёмная гигиеническая защита от брызг , если кресло-туалет используется как насадка на унитаз
- Регулируемая высота сиденья
- Регулируемые по высоте ножки с противоскользящими резиновыми наконечниками

- Откидные поручни с пластиковыми подлокотниками
- Большое удобное сиденье.
- Максимальная нагрузка: 225 кг.
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

1.3 Упаковка

В комплектации: рама кресла-туалета, ободок с крышкой или сиденье без крышки, ведро, защита от брызг, руководство по эксплуатации, съемные ножки.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.

2.2 Порядок работы.

Перед использованием проверьте части кресло-туалета на наличие дефектов и повреждений.

Сборка кресла-туалета 10583.

1. Установите спинку на заднюю часть рамы, вставьте переднюю поперечную балку в специальные отверстия.

Убедитесь, что обе медные кнопки выскочили полностью из отверстий.

2. Наклоните раму и прикрепите держатель съемного судна.

3. Прикрепите ножки к раме.

Сборка кресла-туалета 10580.

1. Разверните поручни кресла-туалета.

2. Наклоните раму и прикрепите держатель съемного судна.

3. Вставьте переднюю поперечную балку в специальные отверстия.

Убедитесь, что обе медные кнопки выскочили полностью из отверстий.


4. Прикрепите ободок и крышку.

5. Вставьте U-образную перекладину в заднюю часть рамы.

6. Вставьте ведро.

Сборка кресла-туалета 10582.

1. Поднимите поручни кресла-туалета, как показано на рисунке, так чтобы фиксатор оказался в отверстии на раме.

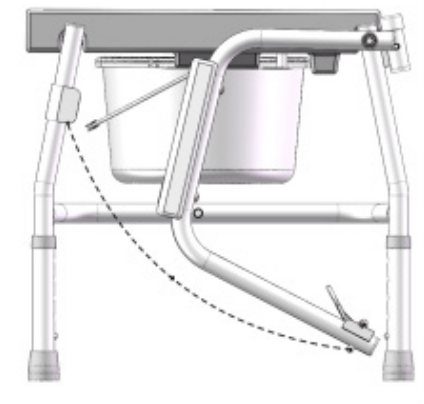



2. Установите спинку в отверстия на раме, как показано на рисунке. Убедитесь, что спинка надежно зафиксирована.



Сборка кресла-туалета 10581Са.


1. Опустите ведро в отверстие и накройте крышкой.

Сборка кресла-туалета 10589.

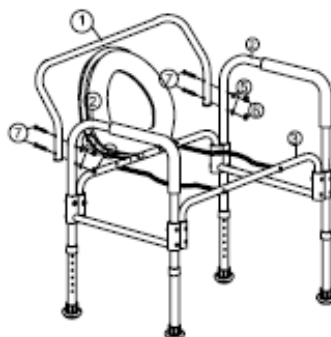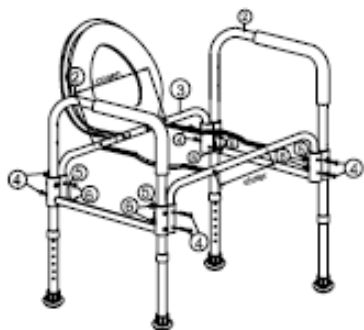

Установите трубку-кронштейн между подлокотниками (2 x 2)
Закрепите шурупами (4 x 8)
болтами (5 x 8)
контргайками (6 x 8)

Установите (1 x 1) спинку в отверстие между подлокотниками (2 x 2)
Закрепите шурупами (7 x 4)
болтами (5 x 4)
контрагайками (6 x 4)

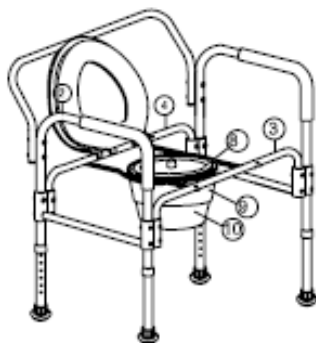

Поставьте насадку на ведро (8 x 1), ведро (9 x 1) и защиту от брызг (10 x 1) в отверстие, закрепленное на трубках крон-

3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати,
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Кресла-туалеты 10580, 10581Ca, 10583,10589, 10582
Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15
по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90

www.sims2.ru

Номер артикула	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Для заметок