

Бандаж послеоперационный Тривес Т.23.08

Особенности:

- изготовлен из эластичного влаговпитывающего полотна с высоким содержанием хлопка, исключающего появление аллергических реакций
- имеет анатомическую форму, позволяющую оптимально разместить бандаж на грудной клетке женщины
- специальная вязка полотна обеспечивает отведение влаги с поверхности тела
- передняя панель снабжена 2 пластиковыми ребрами жесткости для усиления компрессии и фиксации грудной клетки
- обеспечение необходимой компрессии для ускорения реабилитации в послеоперационный период
- сохранение объема дыхательных движений и снижение риска послеоперационных пневмоний

Функции:

- обеспечение эластичной фиксации грудной клетки
- уменьшение болей в области травмы, послеоперационной раны или рубца, болей при дыхании
- оптимальные условия для заживления послеоперационной раны и формирования послеоперационных рубцов

Инструкция по применению:

- надеть бандаж после операции на нижнее белье или непосредственно на тело лежа на спине под контролем врача
- зафиксировать застежку бандажа в зависимости от места расположения послеоперационного шва
- степень фиксации и длительность ношения определяются лечащим врачом

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу. Если в период использования послеоперационного бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу и хранению:

- перед стиркой застегнуть все застежки
- рекомендована ручная стирка при температуре 30°C, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- после стирки тщательно прополоскать бандаж
- не тереть и не выжимать изделие
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Состав:

- хлопок — 53%

- полиэстер — 31%
- эластан — 16%
- ребра: пластик

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Срок хранения 5 лет.